



my happy hippo



swaggy®

CATÁLOGO

de Productos


Tendencia y accesorios funcionales
para tus dispositivos auditivos

- PEGATINAS Interactivas
- PEGATINAS Funcionales
- CORDONES de sostén
- VINCHAS de sostén
- TWIST Protectores
- ABRACITOS de sostén
- PINES de Silicona
- CADENITA de sostén
- Información IMPORTANTE

PEGATINAS Interactivas

Representan una manera simple, accesible y dinámica de Personalizar los Dispositivos.

Son apliques de vinilo autoadhesivos diseñados para adaptarse exactamente al tamaño y forma de los equipamientos.
Aptas para dispositivos auditivos marca: Cochlear, Medel, Advanced Bionics, Phonak, Widex, Signia.

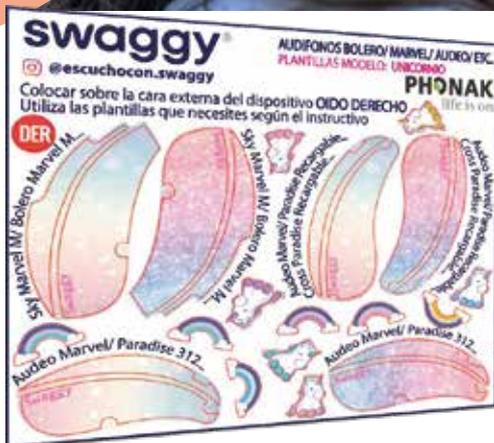

Fueron cuidadosamente diseñadas para no alterar ninguna función del Equipamiento. Respetan las entradas de Micrófonos, botones, controles, pernos de reparación, aperturas de pilas-baterías, etc.

¿Cómo se colocan?

Las Pegatinas Interactivas se colocan sobre la cara externa del Dispositivo. Cada Pegatina se entrega troquelada, con el nombre técnico del Dispositivo o de sus partes (según corresponda), para que se usen aquellas que conciernen al Equipamiento de cada paciente en particular.

Funcionalidad:

A diferencia del sistema de carcasas de colores, las Pegatinas Interactivas permiten que el propio paciente pueda colocarlas, intercambiarlas, coleccionarlas y recolocarlas. Además, posibilitan contar con varios diseños en uno.

No dejan residuos sobre el Dispositivo. Aptas para colocar dentro de todos los tipos de Deshumidificadores, eléctricos o no. No es necesario quitar las Pegatinas para enviar el Dispositivo al servicio técnico. Son biocompatibles, hipoalergénicas, resistentes al agua, sol, calor, no se dañan por transpiración.

* Una misma Pegatina contiene los modelos de la marca específica del Dispositivo y sus componentes. Por lo que no hay desperdicio de stock por modelos menos usados que otros.

* Una misma Pegatina permite al paciente armar diferentes estilos.

Contacto España:

@myhappyhippo.es

www.myhappyhippo.es

hola@myhappyhippo.es

+34 659 76 00 95

MAS →
INFORMACION



PEGATINAS Interactivas

Aptas para: todos los modelos de **Audífonos**, Procesadores de **Implante Coclear** retroauriculares, Procesadores de **Implante Coclear botón**, y Sistemas Óseos.



Set de Pegatinas Interactivas



Set de Pegatinas Interactivas



Set de Pegatinas Interactivas



Set de Pegatinas Interactivas

MODELOS DISPONIBLES:

Cute:



Dinos:



Heroes:



Magic:



Monsters:



Mousy:



Paws:



Pets:



Super:




Toys:



Unicorn:



Abstract:

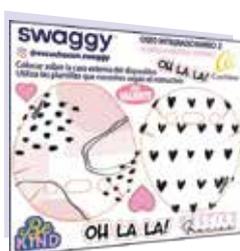

Black&White:



Boho:



Fly:



Nature:



Sky:



Zodiaco:



PEGATINAS Funcionales

En casos pérdidas, extravíos, robos u olvidos del Dispositivo, la Pegatina Funcional con mensaje de alerta y teléfono informa la importancia del Dispositivo y permiten el contacto para la devolución.

La fotoluminiscencia posibilita encontrar el Dispositivo aún en la oscuridad o en áreas con baja luz.

Aptas para dispositivos auditivos marca: Cochlear, Medel, Advanced Bionics, Phonak, Widex, Signia.



Un mismo set de Pegatinas es apto para todos los modelos de la marca específica del Dispositivo. No hay desperdicios de stock. Son apliques de vinilo autoadhesivos diseñados para adaptarse exactamente al tamaño y forma de los Dispositivos Auditivos marca: Cochlear, Medel, Advanced Bionics, Phonak, Widex, Signia.

¿Cómo se colocan?

Se colocan sobre la cara interna del Dispositivo, es decir que, durante el uso del mismo, los datos plasmados en la Pegatina no quedan a la vista.



Las Pegatinas Funcionales contienen:

- * **Pegatina troquelada al tamaño y forma del Dispositivo:** contiene mensaje de alerta y un espacio libre para que el paciente o familiar escriba el teléfono de contacto (se puede usar lapicera o fibra indeleble, la cual recomendamos).
- * **Pegatina laminada cobertor transparente:** Preservan la calidad del producto y garantizan la durabilidad del número de teléfono escrito. Son fabricadas a la medida del Dispositivo y se colocan sin esfuerzo sobre la plantilla proporcionada.
- * **Stickers Fotoluminiscentes:** se pueden colocar sobre la Pegatina funcional, en el lomo del Dispositivo o en los bordes (su pequeño tamaño no tapa micrófonos, botones, pernos, aperturas de batería). De esta manera, si el Dispositivo se pierde, podrá verse aún en la oscuridad, en cualquier posición en la que se halle. Su material fotoluminiscente se carga en segundos tanto con luz natural, como con luz artificial, mientras el paciente usa el dispositivo.

Son biocompatibles, hipoalergénicas, resistentes al agua, sol, calor, no se dañan por transpiración.

CORDONES de sostén

Son cordones elásticos que se utilizan para sujetar los Dispositivos Auditivos a la ropa.

Se utilizan en Audífonos, Procesadores de implante coclear retroauriculares y botón, y Sistemas óseos. Apto para todos los Procesadores Retroauriculares, todos los Audífonos. Y para el Procesador botón: Kanso, y los Sistemas óseos: Samba, Adhear, Osia, Baha5, Baha5 Power, Baha6 Max.



Su principal función es el Sostén, la Protección y el Cuidado del Dispositivo. Ideales para uso continuo.

Es indispensable, se indica y recomienda el uso de elementos de sostén con los equipamientos.

¿Cómo se colocan?

El broche estilo cocodrilo se agarra a la ropa. Los extremos del cordón disponen de o'ring que se enhebran en el Dispositivo. Por último, se desliza el pin regulador para darle el ajuste deseado.

Funcionalidad:

Su material elástico garantiza la libre movilidad del cuello, la cabeza y el tronco sin molestias. El broche plástico estilo cocodrilo asegura el agarre, sin dañar ni marcar la ropa.

Los o'ring de silicona, por su material, son resistentes y pueden agrandarse para adaptarse a cualquier tamaño de dispositivo y luego recuperar su tamaño para garantizar el ajuste. Además, la silicona es antideslizante, por lo que evita que el Dispositivo se desplace. Su fino grosor garantiza que no tapen botones o micrófonos.

Finalmente, el pin regulador permite ajustar el cordón para mayor comodidad.

- * Para todas las edades.
- * Apto para Procesadores, Audífonos y Sistemas Óseos (unilateral y bilateral/bimodal).
- * Protección y cuidado ante pérdidas, caídas y golpes.
- * Ideal como sostén de uso continuo.

Aclaración importante: Son aptas para todos los Procesadores Retroauriculares, todos los Audífonos. Y para el Procesador botón: Kanso, y los Sistemas óseos: Samba, Adhear, Osia, Baha5, Baha5 Power, Baha6 Max. No son aptos para Procesador Kanso 2, Rondo, Rondo2, Rondo3, Samba2 porque estos dispositivos no cuentan con el espacio destinado a esta función.

VINCHAS de sostén

Su principal función es el Sostén, la Protección y el Cuidado del Dispositivo. Alta sujeción. Aseguran la posición del Dispositivo en el pabellón. Evitan que se desplace de su lugar. Apto para todos los Procesadores Retroauriculares y todos los Audífonos.



NEGRO:



AZUL:



ROJO:



FUCSIA:



ROSA:



Muy recomendable para todas las edades, de uso continuo durante actividades cotidianas, al practicar deportes o al realizar tareas que exigen mucha movilidad. Muy útil para niños pequeños, niños muy movidos o para asegurar la posición del Dispositivo al rozar la cabeza con el cochecito, o al estar acostados. Recomendable también en pacientes con escaso sostén cefálico.

¿Cómo se colocan?

Se colocan abrazando la circunferencia de la cabeza, posicionándose desde la frente hacia la nuca.

Funcionalidad: está en sus componentes:

Sus reguladores permiten ajustar el diámetro de la vincha a la circunferencia de la cabeza. Por este motivo, es apta para todas las edades (bebés, niños, adolescentes y adultos).

Su material elástico garantiza su ajuste ergonómico y cómodo.

Las cintas sujetadoras son de silicona. Por su material, son resistentes y adaptan su tamaño al del Dispositivo. Además, la silicona es antideslizante, por lo que evita que el Dispositivo se desplace. Se puede usar una o las dos, según requiera el tamaño del Dispositivo.


Las bandas deslizantes garantizan que el Dispositivo quede colocado en su posición habitual, apoyado sobre y detrás del pabellón. Además de la comodidad en el uso, esto asegura que los MICRÓFONOS DEL DISPOSITIVO queden colocados en su posición correcta, es decir VERTICALIZADOS. Preservando, de esta manera, la funcionalidad de los micrófonos omnidireccionales y micrófonos direccionalizados zoom.

- * Ideal para obtener máxima estabilidad del Dispositivo en el pabellón auditivo, sin desplazamientos.
- * Diámetro ajustable, apto para todas las edades (bebés a adultos mayores).
- * Apta para Procesadores y Audífonos (equipamiento bilateral o bimodal).
- * Alta sujeción. Protección y cuidado ante pérdidas, caídas o golpes.
- * Preserva la funcionalidad (omni-dir) de los micrófonos.

TWIST Protectores

Son conductos espiralados de alta resistencia que permiten proteger los cables y tubos, y personalizar el Dispositivo. Son retractiles y se adaptan a la longitud que se pretende cubrir.

Aptos para audífonos y Procesadores de implante coclear retroauriculares, para todas sus longitudes de cables.

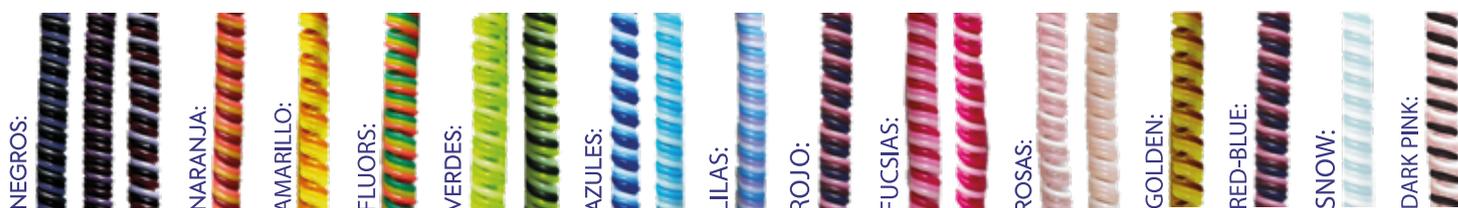

Gran variedad de colores, desde discretos, a vivos y llamativos.

¿Cómo se colocan?

En los Procesadores, se colocan cubriendo el cable de la bobina-antena de un extremo al otro (abrazando el inicio de los conectores).

En los Audífonos, se colocan cubriendo el tubo-spaghetti del molde.

Su forma de resorte permite ir adaptando el Twist fácilmente.

Funcionalidad:

Garantizan resistencia y durabilidad ante golpes, tirones y estrangulaciones.

Sumado a esto, por su combinación de colores y su estilo, permiten la Personalización del Dispositivo.

Su diámetro adecuado, su elasticidad y maleabilidad permiten conservar la funcionalidad del cable, sin compresiones. Por su material, poseen gran flexibilidad y resistencia.

Se pueden quitar y recolocar las veces que sea necesario.



Contacto España:

@myhappyhippo.es

www.myhappyhippo.es

hola@myhappyhippo.es

+34 659 76 00 95

MAS →
INFORMACION



ABRACITOS de sostén

Son aritos completamente de silicona hipoalergénica que se utilizan para mantener los Dispositivos Auditivos sujetos al pabellón. Además, funcionan como soporte para enhebrar el Pin.

Apto para todos los Procesadores Retroauriculares y todos los Audífonos.



Su principal función es el Sostén, la Protección y el Cuidado de tu Dispositivo. Poseen dos o-rings de altísima resistencia a la tracción, lo que garantiza larga durabilidad y máximo agarre al dispositivo.

¿Cómo se colocan?

Enhebrando los o-rings en el Dispositivo. Una vez colocados, se rodea el pabellón auditivo con el Abracito y se acomoda el Dispositivo en su posición habitual detrás de la oreja.

Funcionalidad:

Aseguran la posición del Dispositivo en el pabellón. Previenen que el Dispositivo se desplace de su lugar, se caiga y se pierda o se golpee.

Los o-rings de silicona, por su material, son resistentes y pueden agrandarse para adaptarse a cualquier tamaño de dispositivo y luego recuperar su tamaño para garantizar el ajuste. Además, la silicona es antideslizante, por lo que evita que el Dispositivo se desplace. Su fino grosor garantiza que no tapen botones o micrófonos.

La composición de silicona hipoalergénica del Abracito, permite su uso permanente en contacto con la piel.

- * Para todas las edades.
- * Apto para Procesadores y Audífonos (equipamiento bilateral o bimodal).
- * Protección y cuidado ante pérdidas, caídas y golpes.
- * Sostén menos visible que el cordón o la vincha.



PINES de silicona

Son apliques de Silicona con soportes especialmente diseñados para adaptarse a los tubos-spaghetti en audífonos o Abracitos de sostén en implantes.

Aptos para Audífonos y Procesadores de implante coclear retroauriculares.



¿Cómo se colocan?

En Audífonos, se puede colocar en el Abracito de sostén, abriéndolo en su unión. O en el molde, quitándolo el tubo plástico- spaghetti del equipamiento. Se enhebra el Pin en el abracito o tubo plástico. En Procesadores, se coloca en el Abracito de sostén, abriéndolo en su unión.

Funcionalidad:

Su principal función es la Personalización de tu Dispositivo.

En conjunto con las Plantillas Interactivas permiten llevar los dispositivos expresando gustos, colores, personajes favoritos, hobbies. Permiten comunicar como lo hacemos con nuestra ropa, accesorios de moda y objetos que nos identifican.

Los Pines cuentan con soportes fabricados para ser adaptados en todos los tamaños de tubos plásticos (spaghetti o tubo fino) o en el Abracito de sostén. Detalladamente diseñados para mantener la funcionalidad del Dispositivo, su material blando no agrega ruidos. Aseguran el agarre, garantizando (por su apertura y su material flexible) que no estrangulan el tubo o abracito sobre el que se aplican.

Se pueden quitar y recolocar las veces que se necesite, porque son Coleccionables y de uso Dinámico. Se pueden ir cambiando las Plantillas y Pines según el estilo que el paciente quiera imprimir a sus Dispositivos.


* Apto para Procesadores y Audífonos (equipamiento bilateral o bimodal).

* Material y confección idóneos para preservar la funcionalidad del Dispositivo.

CADENITA de sostén

Son cadenitas metálicas que se utilizan para sujetar los Dispositivos Auditivos al pelo.

Se pueden adaptar en Audífonos, Procesadores de implante coclear retroauriculares y Sistemas óseos.

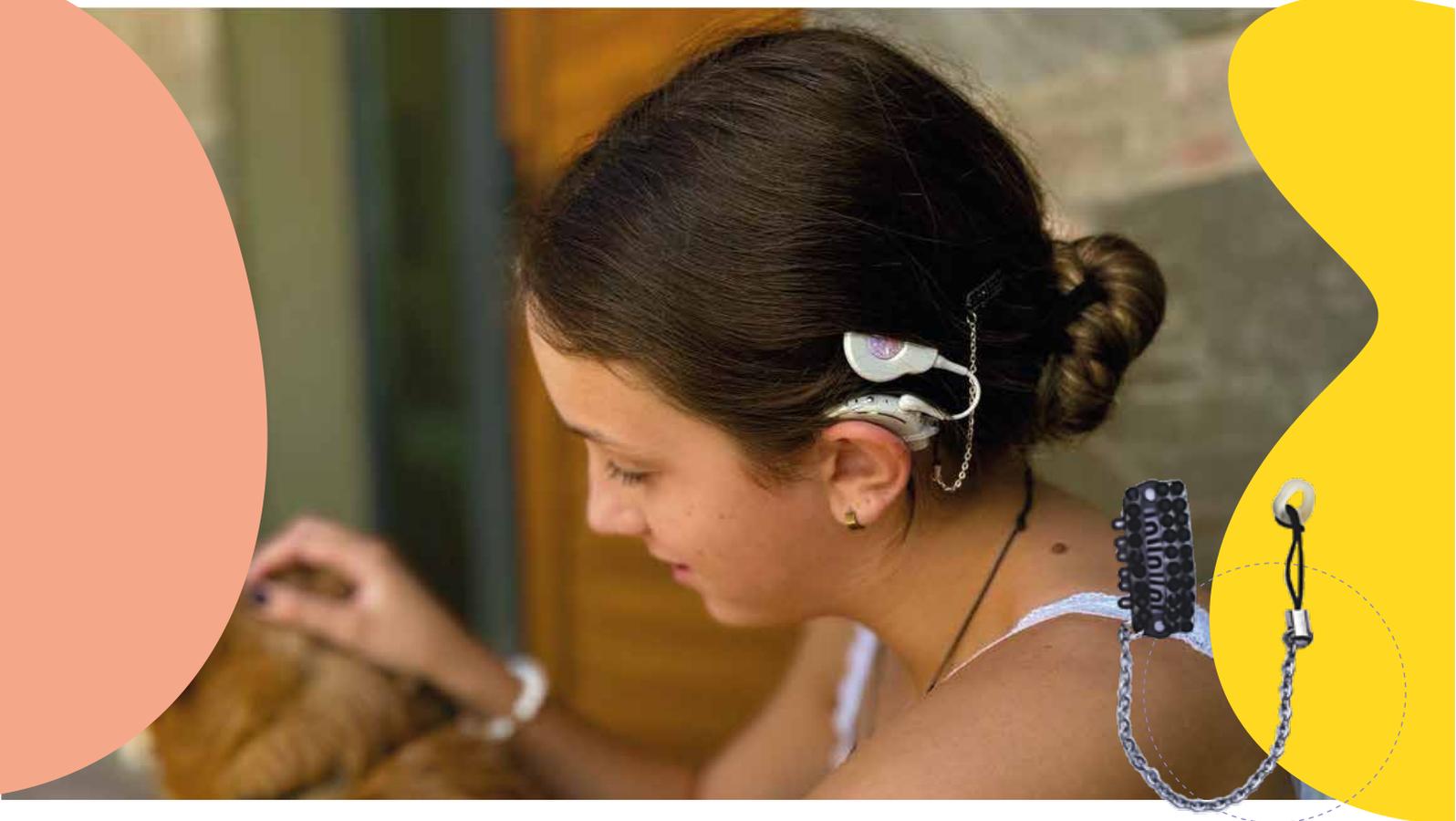

¿Cómo se colocan?

Enhebrando el o'ring al Dispositivo, y sujetando la micro-peineta al pelo. El Dispositivo quedará colocado en su posición habitual, detrás de la oreja del usuario.

Funcionalidad:

Su principal función es el Sostén. Agregado a esto, por su diseño, permite sumar estilo a la adaptación del Dispositivo. Son una buena opción de sostén para usar en fiestas, eventos o momentos especiales.

Evitan que el Dispositivo se caiga y se pierda o se golpee.

La micro-peineta es un sistema usado por empresas proveedoras de Equipamientos, porque asegura la sujeción, garantizando comodidad en el uso. Además, a diferencia de las que ofrecen los proveedores, cuenta con adornos de strass negro, que le dan un toque único y sofisticado.

El o'ring de silicona, por su material, es resistente y puede agrandarse para adaptarse a cualquier tamaño de dispositivo y luego recuperar su tamaño para garantizar el ajuste. Además, la silicona es antideslizante, por lo que evita que el Dispositivo se desplace. Su fino grosor garantiza que no tapen botones o micrófonos.

- * Para todas las edades.
- * Apto para Sistemas óseos, Procesadores y Audífonos (equipamiento bilateral o bimodal).
- * Protección y cuidado ante pérdidas, caídas y golpes.
- * Sostén sofisticado, para fiestas, eventos o momentos especiales.

Aclaración importante: Son aptas para todos los Procesadores Retroauriculares, todos los Audífonos. Y para el Procesador botón: Kanso, y los Sistemas óseos: Samba, Adhear, Osia, Baha5, Baha5 Power, Baha6 Max. No son aptos para Procesador Kanso 2, Rondo, Rondo2, Rondo3, Samba2 porque estos dispositivos no cuentan con el espacio destinado a esta función.



Contacto España:

@myhappyhippo.es

www.myhappyhippo.es

hola@myhappyhippo.es

+34 659 76 00 95



my happy hippo



swaggy®

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Sobre nuestros Productos



CUIDADO



BENEFICIOS & RESULTADOS



TESTIMONIOS



Evidencia Científica Internacional

COMO CUIDO MIS PRODUCTOS SWAGGY?



- ★ Todos los Productos Swaggy pueden colocarse en el Deshumidificador, sea éste eléctrico o no.
- ★ No es necesario quitar tus Productos Swaggy cuando envíes tu Dispositivo al servicio técnico. Si igualmente los quisieras quitar, se pueden guardar en su empaque original, para luego recolocarlos.
- ★ La durabilidad de los productos es de aproximadamente dos años, dependerá del cuidado que les otorgues. Si necesitaras limpiarlos, puedes hacerlo (sobre su superficie) con un paño levemente humedecido con agua y jabón. Siempre evitando mojar el Dispositivo.
- ★ Los Productos Swaggy no alteran sus condiciones por exposición al agua, jabón o transpiración. Admiten exposición al calor y rayos UV, sin dañar su forma, función ni color. Tener presente igualmente, que se debe evitar la exposición de los Dispositivos a todas estas condiciones.
- ★ Todos los elementos son biocompatibles e hipoalergénicos.
- ★ Todos los Productos Swaggy son funcionales, es decir que fueron especialmente diseñados y fabricados para conservar la correcta funcionalidad de los Dispositivos Auditivos sobre los que se aplica.

Contacto España:

@myhappyhippo.es

www.myhappyhippo.es

hola@myhappyhippo.es

+34 659 76 00 95

BACK ↩

BENEFICIOS & RESULTADOS

El objetivo que persiguió la industria durante mucho tiempo fue lograr equipamientos auditivos cada vez más pequeños y menos visibles. Sin embargo, la realidad es que estos equipos, por su naturaleza, requieren componentes externos, físicos y tangibles. Esta búsqueda de invisibilidad no ha logrado cambiar la percepción social sobre estos dispositivos.

Teniendo en cuenta esta realidad y las consecuencias negativas que esto conlleva, como demuestran innumerables artículos e investigaciones ([solo algunas referidas en este documento](#)), resulta imperioso lograr un cambio de creencias sobre lo que representa llevar un dispositivo de ayuda auditiva.

SWAGGY nació para abrazar la necesidad de los usuarios y proponer **un cambio de paradigma en el uso.**

A lo largo de estos 4 años de vida, gracias a la escucha activa de las necesidades de nuestros usuarios, **hemos desarrollado una solución integral** que empodera a las personas con pérdida auditiva, ayudándolas a aceptar positivamente su condición y a disfrutar de una vida plena y conectada. Ofrecemos personalización a medida, cuidado, seguridad, protección y, sobre todo, la libertad de vivir la vida al máximo, sin que la hipoacusia sea una limitación. Crear los medios necesarios para brindar a las personas con pérdida auditiva la oportunidad de incorporar positivamente su hipoacusia en su sentido de sí mismas y brindar una experiencia gratificante en el uso de dispositivos, es la misión que perseguimos con SWAGGY.

Producto de los beneficios comprobados que otorga a los usuarios, en 2023 Swaggy recibió el reconocimiento que eleva su labor a un nivel excepcional, siendo declarado **Proyecto de Interés Nacional para Estados Unidos**. Un hito épico que atestigua su invaluable aporte a la calidad de vida de la comunidad hipoacúsica.

La compañía, con sede en Argentina, continúa expandiéndose por países latinoamericanos y ya ha generado lazos con empresas líderes de la industria, representantes de marcas de implantes cocleares, reconocidas a nivel mundial. Estamos orgullosos de ser pioneros en la región, impulsando la innovación en el campo de los dispositivos auditivos.

Hoy, ampliamos nuestras fronteras y queremos anunciar nuestra **alianza con My Happy Hippo en España**, un referente que se destaca por ofrecer una experiencia de usuario excepcional. Juntos, lideraremos la revolución en la tecnología auditiva, ofreciendo soluciones personalizadas y de vanguardia que marcarán la diferencia en la experiencia de los usuarios.

Gracias al respaldo de la comunidad entera y a nuestro compromiso con la excelencia, estamos cambiando vidas y estableciendo nuevos estándares en la industria.

Esperamos contar con ustedes en este cambio de tendencia de países pioneros en innovación y desarrollo están avalando, y que la comunidad apoya día a día.



TESTIMONIOS

A continuación, algunos de los testimonios de los usuarios de nuestros productos:

Siempre excelente calidad. Y hermoso diseño. Mejor imposible. Gracias a vos. Por hacer más hermosos los implantes. 15:30




Fan de Swaggy y este relanzamiento!! No solo los más lindos para nuestros hijos! Sino el apoyo tan grande que nos dan a nosotros los padres! Ese gol de autoestima y necesidad de salir a mostrar sin prejuicios!! De explicar con Messi Stich o Airón Man que él también es un poco un súper héroe, y el orgullo con que lo hace! Todo eso y más nos dieron las plantillas de San!! Desde acá, un niño feliz, unos padres felices!!! Te mando todo el amor del mundo san, te mereces lo más hermoso! Y por supuesto abajo te mando nuestro pedido!!! 🥰🥰🥰 09:54

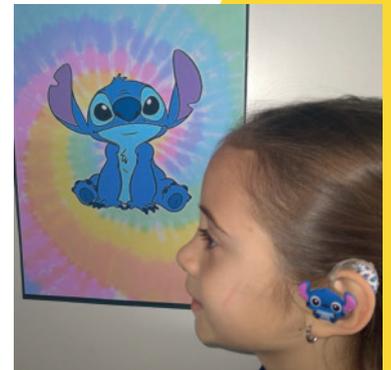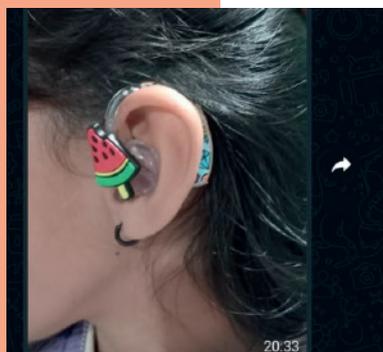La felicidad de mi hija es impagable, te abrazo a la distancia y te agradezco de corazón ❤️ 20:34



Hola!! Como estas??? Te cuento que Ámbar ya esta encendida! Y decoro su implante 16:48

Ya usamos las vinchas 16:49

Después te voy a ir mandando más fotos 16:49


Gracias por todo 🤍 16:49

Esta feliz 16:49

Si era agradeciendo porque ahora Aiti ya no se los saca a los procesadores se le facilito mucho con la vinchita puede jugar con sus primos hacer lo que ellos hacen sin que se le caiga así que gracias



Si! Gracias!!! Ya habíamos comprado vinchas el año pasado. Son las mejores ❤️ 6:01 PM

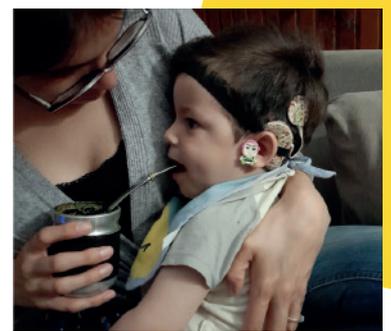


Le encanto lo usa con mas ganas jajaja 20:21

Tú Ayyy que emoción!! Eso queremos lograr, que los muestren con orgullo! Gracias Sofi y Helena por hacerlo posible 🤍

Re orgullosa los muestra . quiere ir al jardín para mostrarlos. .se mira al espejo. 15:06

Y son re útiles. Lo que ustedes hacen no tienen precio 9:14 p.m.



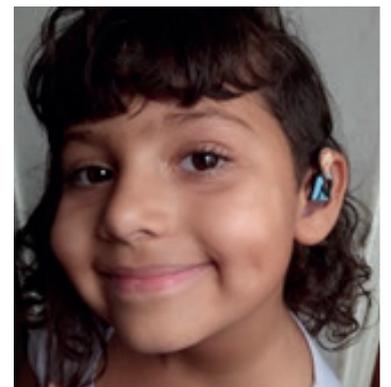

Me encanta todo y te felicito por esto que haces, para los nenes es muy lindo y imagino que les debe dar mas ganas de usarlos, mí nene tiene 3 años y se que esto le va a dar mas ganas de ponérselos 12:36



Se los muestra a todos en la calle 😊 20:07

Dale! Y muchas gracias d nuevo 🌈 16:10

Q bueno q los encontramos por q hacen q mí pequeña Kyra lleve sus implantes con color y alegría 🤝💖 16:11

Muchísimas gracias! No sabes la felicidad de la nena! Ya quiere ir a la escuela con sus accesorios. No le sacamos foto porque no quería que nadie le toque el moño. Ahora si usara su audifono! 21:14

Hola como estas?? Disculpa la molestia, quería saber si podrias enviarme el catalogo. Tengo una peque que tiene implantes 🤝 y me parece una idea 💡 hermosa lo que hacen... 11:18

Fotos y Testimonios autorizados para ser publicados.



TESTIMONIOS

A continuación, algunos de los testimonios de los usuarios de nuestros productos:

Sii cada día mejor!!! Le hubieras visto la cara cuando ayer le mostré todo lo nuevo 🥰, una felicidad 15:55

Hola San siii! Fuimos al correo porque vinieron y no estábamos. Mañana armo todo y te mando fotito. Ame todooooo! Colores, terminaciones, material todo. 19:59

Hola Sandra ! Ya activamos un implante , la verdad queda hermoso con tu deco ! Gracias por dedicarte a esto 10:38 AM



Gracias mi reina. Eres un sol.. Dios t bendiga por tan hermoso trabajo que tienen.. nos facilitan la vida. Te envio un fuerte abrazo 😊 8:17 PM



Los nuevos modelos son un 1000. Pero los clásicos nunca pasan de moda! Otro cambio para Yago! Siempre de tu mano! Ya no sabemos qué color real es el procesador! Siempre está súper lookeado! ❤️🥰❤️ 11:08 AM

Hola buen día ! No quería dejar de contarte que la felicidad de mi hijo con su implante del hombre araña , es nivel 1000 08:40

Llego hoy al colegio (va sino comun es el único nene con implante) y fue corriendo a mostrarle a sus amigos el implante del hombre araña ! Muchas gracias 😊 08:40



Haci quedó 🥰 gracias a mí nene le encantó quedó feliz 22:46



La verdad q hermoso lo q hacen alegra mucho saber q existe un lugar y una persona q piensa en estas cosas para hacer q los niños puedan llevar sus implantes y audifonos más bellos 🥰 12:44

Precioso 18:36
Lo primero q dijo fue " ahora no me va a dar más vergüenza " 🥰🥰 18:36
Fue gratificante escuchar eso 18:37
Asique muchas gracias y maravillosa idea 18:37



El martes recibimos el pedido. Vicente estaba tan contento . Subí una historia a instagram y te etiquete ese día 11:53



Siii le re gustaron 🥰❤️ 15:30
Cuanto me alegro!! No sabes 15:31
Es genial lo que haces A él le cuesta un montón usarlos los odia desde los seis meses que los tiene pero no hay forma 15:32
Que le guste usarlos 15:32
Así que con esto es un poquito más llevadero ojalá que le dure la emoción 🥰 15:33

excelente.. perfecto... accesibles y divertidos
Gracias a ustedes por dedicarse a esto q es tan importante 16:31



Buenísimo que se vean en la oscuridad ahora. Eso es clave!!! 11:50

nos encanto!! Hermoso como siempre, todo impecable! 11:38



Divino todo ... y sobre todo le pone onda al implante en vez de tratar de camuflarlo , les hace bien a los nenes 11:40

Nos cambiaron la vida los sticker personalizado

Muy hermoso! Gracias por acompañarnos 18:48



Evidencia Científica Internacional que respalda los Principios de Swaggy

“Wear It Loud”: How and Why Hearing Aid and Cochlear Implant Users Customize Their Devices. HALLEY P. PROFITA, ABIGALE STANGL, LAURA MATUSZEWSKA , y CIELO DE SIGRUNN , Universidad de Colorado Boulder, RAJA KUSHALNAGAR , Universidad Gallaudet, SHAUN K. KANE , Universidad de Colorado Boulder. <https://par.nsf.gov/servlets/purl/10084498>

[1]

World health Organization (OMS)- “Deafness and hearing loss, 2021”.~
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss>
<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss>

[2]

Decorating your child's hearing aids or cochlear implants. National Deaf Children’s Society.
<https://www.ndcs.org.uk/information-and-support/childhood-deafness/hearing-aids/decorating-your-childs-hearing-aids-or-cochlear-implants/>

[3]

National Deaf Children's Society | supporting deaf children UK
Bullying Advice for Parents of Deaf Children. Anti-bullying Alliance & NDCS (leading charity dedicated to creating a world without barriers for deaf children and young people).
<https://successforkidswithhearingloss.com/wp-content/uploads/2019/09/Bullying-Advice-for-Parents-of-Deaf-Children-NDCS-UK.pdf>

[4]

<https://cronicasdasurdez.com/verguenza-de-la-sordera-que-ella-no-te-salga-tan-cara/>

[5]

ASHA- “Los efectos de la pérdida de audición en el desarrollo”.
<https://www.asha.org/siteassets/uploadedFiles/Los-efectos-de-la-perdida-de-audicion-en-el-desarrollo.pdf>

[6]

World health Organization (OMS)- “Childhood hearing loss”.
file:///C:/Users/guada/Downloads/WHO_NMH_NVI_16.1_eng.pdf

[7]

Peer Relationship Experiences Of Deaf And Hard-Of-Hearing Adolescents, The Journal of Deaf Studies and Deaf Education, Volume 25, Issue 2, April 2020, Pages 153-166. E Terlektsi, J Kreppner, M Mahon, S Worsfold, Colin R Kennedy

<https://academic.oup.com/jdsde/article/25/2/153/5734496?login=true>

[8]

THE UNIVERSITY OF TEXAS DALLAS. Dr. Andrea Warner-Czyz / 2018
[Study Shows Children with Hearing Loss Experience More Bullying | News Center \(utdallas.edu\)](https://news.utdallas.edu/health-medicine/study-shows-children-with-hearing-loss-experience/)
<https://news.utdallas.edu/health-medicine/study-shows-children-with-hearing-loss-experience/>

[9]

Evidencia Científica Internacional que respalda los Principios de Swaggy

The hearing journal Pediatric Audiology
Peer Victimization of Children with Hearing Loss

By Andrea D. Warner-Czyz, PhD

https://successforkidswithhearingloss.com/wp-content/uploads/2019/09/Peer_Victimization_of_Children_with_Hearing_Loss.4.pdf

[10]

Gallaudet University Study - 2013. Deaf and hard of hearing students' perspectives on bullying and school climate. 812 Deaf and Hard of Hearing Students in 11 US Schools.

Journal: The American Annals of the Deaf. Professional journal dedicated to quality in education and related services for deaf or hard of hearing children and adults.

<https://www.jstor.org/stable/26234900>

[11]

BOOK: Deaf Culture: Exploring deaf Communities in The United States. San Diego, CA.

Irene W. Leigh Jean F. Andrews Raychelle L Harris. Copyright ©2018 by Plural Publishing, Inc.

[file:///C:/Users/guada/Downloads/Deaf%20Culture_%20Exploring%20Deaf%20Communities%20in%20the%20United%20States%20\(%20PDFDrive%20\)%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/guada/Downloads/Deaf%20Culture_%20Exploring%20Deaf%20Communities%20in%20the%20United%20States%20(%20PDFDrive%20)%20(1).pdf)

<https://www.pdfdrive.com/deaf-culture-exploring-deaf-communities-in-the-united-states-d182200481.htm>

!

[12]

“Wear It Loud”: How and Why Hearing Aid and Cochlear Implant Users Customize Their Devices

HALLEY P. PROFITA, ABIGALE STANGL, LAURA MATUSZEWSKA, and SIGRUNN SKY, University of Colorado Boulder. RAJA KUSHALNAGAR, Gallaudet University. SHAUN K. KANE, University of Colorado Boulder

<https://par.nsf.gov/servlets/purl/10084498>

[13]

AMERICAN SOCIETY OF DEAF CHILDREN KID POWER. Safety power project.

Protecting our deaf and hard of hearing children. International Safety for all abilities.

<https://deafchildren.org/es/2021/08/protecting-our-deaf-and-hard-of-hearing-children-webinar/>

<https://www.kidpower.org/all-abilities/>

<https://learn.kidpower.org/path-player?courseid=safety-powers-project&unit=615ca7f17b2b772bc65b9a5f>

[Unit](#)

[14]

Longitudinal Associations Between Bullying and Emotions in Deaf and Hard of Hearing Adolescents.

Evelien Broekhof, Marieke G. N., Marina Camodeca, and Carolien Rieffe. Leiden University, University of Milan-Bicocca, Dutch Foundation for the Deaf and Hard of Hearing Child and University College London.

<https://academic.oup.com/jdsde/article/23/1/17/4107887?searchresult=1>

[15]

Social Integration of Deaf Children in Inclusive Settings.

Loes N. Wauters, Harry Knoors, the Journal of Deaf Studies and Deaf Education.

<https://academic.oup.com/jdsde/article/13/1/21/498014?searchresult=1>

[16]

Adolescents Aesthetic and Functional View of Hearing Aids or Cochlear Implants and Their Relationship to Self-Esteem Levels. Tameka Ellington & Stacey Lim. Pages 59-80 | Published online: 27 Apr 2015.

<https://oaks.kent.edu/article/adolescents-aesthetic-and-functional-view-hearing-aids-or-cochlear-implants-and-their>

[17]

Gracias por ser parte de esta experiencia



Con
swaggy[®]
el poder es tuyo!

*Ingeniería Profesional Patentada. Swaggy es marca registrada.
Queda hecho el depósito que prevee la Ley 11.723 y Decreto de Ley 6673/63.
Swaggy fue declarado de Interés Nacional para Estados Unidos.*

Contacto España:

@myhappyhippo.es

www.myhappyhippo.es

hola@myhappyhippo.es

+34 659 76 00 95

